

Emulador Químico MONITORE

Tipo i6



REF: EQ7

Descrição

O **Emulador Químico EQ7 Monitore** é um Emulador Químico tipo 6, projetado para uma resposta integrada a todos os parâmetros críticos de esterilização por vapor em autoclaves com pré-vácuo que operam a 134°C por 7 minutos ou a 121°C por 20 minutos de exposição direta. Proporciona uma confirmação visual das condições de esterilização ou não, no interior dos pacotes ou caixas, dentro da câmara do esterilizador.

Características de Desempenho

O **Emulador Químico EQ7** tem um círculo de tinta indicadora que muda de cor quanto exposto as condições de esterilização por vapor.

Mudança de cor: Amarelo para Preto.

Porém de acordo com invólucro utilizado para embalar o material, como: caixa metálica, papel grau cirúrgico, vidro, container plástico, SMS, ou outros a cor atingida com o processo poderá variar de **MARROM ESCURO A PRETO ABSOLUTO**, o que indica **APROVAÇÃO** do processo.

Tempo de Mudança de Cor ao atingir os parâmetros críticos:

7 minutos ou mais a 134°C (+/- 1°C) 20 minutos ou mais a 121°C (+/- 1°C)

Estabilidade do indicador:

Antes ou depois da esterilização = Excelente

Instruções de uso

1. Coloque uma tira do **Emulador Monitore** em cada pacote ou caixa a esterilizar e processe conforme seu protocolo.
2. Terminado o ciclo de esterilização, verifique se a cor indicativa mudou completamente de **AMARELO** para **PRETO**.
3. Se o **Emulador Monitore** evidenciar condições inadequadas de esterilização, reprocessar o material com novas tiras indicadoras.

Limitações ambientais

Armazenamento:

Antes da exposição, o **Emulador Químico Monitore** deve ser armazenado em ambiente de temperatura entre 0° a 40° C e umidade normal (10 a 90%) na embalagem original. Após a esterilização, as tiras do **Emulador Químico**

EQ7 Monitore é estável e não requer nenhuma condição especial de armazenamento.

Laminação: na frente. No verso, campos para informações de registro e rastreabilidade

Dimensões: 10,7cm X 2,0cm.

Quantidade / Caixa: 250 tiras

Caixa de Embarque: 25 caixas com 250 tiras

Validade: 36 meses de data de manufatura.

Classificações de padrões

EN ISO 11140-1, TIPO 5

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução – RDC 40 / 2015 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicada no D.O.U. de 26/08/2015.

Guia de Interpretação de Resultados

Emulador Químico Tipo 6 - EQ7

Emulador Químico Tipo i6



VAPOR

121°C-15min | 132°C-9 min | 134°C-3,5min

EN ISO 11140-1

LOT M00005 01/2029



APROVADO
se marrom
ou preto

Antes de exposto

Emulador Químico Tipo i6



VAPOR

121°C-15min | 132°C-9 min | 134°C-3,5min

EN ISO 11140-1

LOT M00005 01/2029



APROVADO
se marrom
ou preto

Emulador Químico Tipo i6



VAPOR

121°C-15min | 132°C-9 min | 134°C-3,5min

EN ISO 11140-1

LOT M00005 01/2029



APROVADO
se marrom
ou preto

Emulador Químico Tipo i6



VAPOR

121°C-15min | 132°C-9 min | 134°C-3,5min

EN ISO 11140-1

LOT M00005 01/2029



APROVADO
se marrom
ou preto

Emulador Químico Tipo i6



VAPOR

121°C-15min | 132°C-9 min | 134°C-3,5min

EN ISO 11140-1

LOT M00005 01/2029



APROVADO
se marrom
ou preto

Aprovados

Emulador Químico Tipo i6



VAPOR

121°C-15min | 132°C-9 min | 134°C-3,5min

EN ISO 11140-1

LOT M00005 01/2029



APROVADO
se marrom
ou preto

Emulador Químico Tipo i6



VAPOR

121°C-15min | 132°C-9 min | 134°C-3,5min

EN ISO 11140-1

LOT M00005 01/2029



APROVADO
se marrom
ou preto

Reprovados



CNPJ 24.060.744/0001-60
Isento de Registro no Ministério da Saúde
www.monitorecme.com.br
SAC: (11) 5026 2949